

Link do produktu: <https://sterylni.com/medal-torebki-foliowo-papierowe-90x135-mm-200-szt-p-203.html>

## Medal Torebki Foliowo-Papierowe 90x135 mm 200 szt



Cena brutto	<b>25,00 zł</b>
Cena netto	<b>23,15 zł</b>
Numer katalogowy	<b>155268426</b>
Kod EAN	<b>5904169464466</b>

### Opis produktu

Torebki do sterylizacji narzędzi w autoklawie. Rozmiar 90x135 mm. 200 sztuk w opakowaniu. Wyprodukowane przez polską firmę MEDAL, specjalizującą się w produkcji opakowań do sterylizacji. Torebki wyposażone są w taśmę samoprzylepną, która umożliwi zamknięcie pakietu bez konieczności zastosowania urządzenia zgrzewającego. Torebki posiadają wskaźnik sterylizacji, który informuje o prawidłowym przebiegu sterylizacji, poprzez zmianę barwy z czerwonej na czarną. Sposób użycia: Przedmiot należy ostrożnie umieścić w torebce, usuwając przed zamknięciem nadmiar powietrza z jej wnętrza. Torebki należy ustawić pionowo na ich krawędziach, w celu ułatwienia procesu sterylizacji i suszenia. Torebki należy układać stroną papierową do papierowej i foliową do foliowej. Na każdej torebce nadrukowano kolorowy wskaźnik klasy 1, który informuje wyłącznie o przeprowadzonym procesie sterylizacji. Prawidłowy przebieg procesu powinien być za każdym razem potwierdzany dodatkowym, odpowiednim wskaźnikiem biologicznym i chemicznym. Instrumenty złożone powinny być przygotowane i sterylizowane zgodnie z instrukcjami ich wytwórców. Uwaga! Nie należy przepięniać autoklawu i trzeba pozostawiać jego zawartość do czasu całkowitego wyschnięcia torebek. Nie można dopuszczać do uszkodzenia, zawilgocenia lub przypadkowego otwarcia torebek. Okres przechowywania pakietów po sterylizacji jest zależny od aktualnie obowiązującego stanu prawnego oraz wymagań władz sanitarnych. Parametry: - Papier medyczny o wysokiej wytrzymałości mechanicznej na sucho i na mokro. Gramatura papieru to 60g/m<sup>2</sup>. Jest zgodny z normą EN PN 868-3. - Folia przezroczysta w kolorze niebieskim, umożliwiająca łatwą identyfikację zawartości. Jest to przezierny laminat foliowy PET/PP wielowarstwowy, 6 warstw folii i 1 warstwa kleju. - Torebki są zgrzewane wielokanałowo. Łączna szerokość zgrzewu wynosi 11,5 mm, co jest zgodne z normą EN PN 868-5. - Nadruk oznaczeń jest wykonany poza obszarem pakowania, co eliminuje możliwość przeniknięcia farby do wnętrza pakietu. - W torebkach wykorzystano wskaźniki sterylizacji klasy I, zgodne z normą EN ISO 11140-1. Powierzchnia wskaźnika wynosi >100 mm<sup>2</sup>. Wyraźna zmiana koloru wskaźnika, z różowego na czarny, daje jasną informację o w pełni wykonanym procesie sterylizacji. - W torebkach wykorzystano taśmę samoprzylepną, która umożliwi szybkie zamknięcie pakietu bez konieczności używania maszyny zgrzewającej.