

Link do produktu: <https://sterylmi.com/medisept-velox-spray-do-dezynfekcji-grejpfruit-1-l-p-159.html>



Medisept Velox Spray Do Dezynfekcji Grejpfruit 1 L

Cena brutto	34,90 zł
Cena netto	32,31 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	155093312
Kod producenta	_14833547362
Kod EAN	5907626633924

Opis produktu

Medisept, Płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni Velox Top AF Grapefruit, 1 l

Medisept, płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni Velox Top AF Grapefruit to gotowy do użycia preparat wykazujący działanie biobójcze przeciwko bakteriom, grzybom, prątkom i wirusom. Jest wyrobem **na bazie alkoholu**. Nie zawiera aldehydu i fenolu, dlatego **nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni**. Wykazuje wysoką tolerancję materiałową na tworzywo ABS i materiały obciowe.

Velox Top AF Grapefruit jest przeznaczony do stosowania wobec aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, unitów, blatów, szafek pacjenta, lamp zabiegowych, łóżek pacjentów, wycisków silikonowych, łyżek protetycznych, protez i wycisków.

Velox Top AF być używany także wobec **powierzchni mających kontakt z żywnością** oraz wszelkich powierzchni pozamedycznych, np. w salonach fryzjerskich, salonach kosmetycznych, przedszkolach i szkołach.

Cechy produktu:

- płyn do mycia i dezynfekcji,
- pojemność: 1 l,
- opakowanie: butelka ze spryskiwaczem,
- zapach: Grapefruit,
- rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy.

Skuteczność biobójcza:

- **30 sekund:** bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe, Adeno, Rota

Sposób użycia:

Aby zdezynfekować powierzchnię, należy równomiernie rozpylić preparat na niej z odległości około 30 cm, tak aby dokładnie ją pokryć (ewentualnie można przetrzeć jednorazowym ręcznikiem).

Jeśli dezynfekcja dotyczy powierzchni mających kontakt z żywnością, konieczne jest ich spłukanie wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukiwania wodą.

Należy unikać stosowania na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi, na przykład szkła akrylowym.

